

# Instrucciones para el paciente



Diseñado para adaptarse a su estilo de vida



Compacto y ligero



Sin cables y fácil de usar



Resistente al agua

## Información acerca del parche CAM

El parche CAM es un monitor cardíaco ligero y discreto que incorpora los más recientes avances en tecnología de monitoreo cardíaco.

Está diseñado para brindar comodidad durante períodos de uso prolongado en hombres, mujeres y niños. Puede utilizar el parche CAM mientras hace ejercicio, se ducha y duerme.

Fecha de remoción del parche CAM:

Instrucciones de devolución:

- Devolver por correo postal
- Devolver a la clínica

Notas:



# Para garantizar que su proveedor reciba un informe de electrocardiograma (ECG) de calidad, revise y siga cuidadosamente estas instrucciones:

## NO HAGA LO SIGUIENTE:

- No se duche ni realice actividades extenuantes que provoquen sudoración durante al menos **24 a 48** horas después de la aplicación.
- No permita que el agua caiga directamente sobre el parche CAM mientras se ducha.
- No se sumerja en agua (bañeras, jacuzzis o piscinas) mientras tenga puesto el parche CAM.
- No use el parche durante una resonancia magnética (RM)

## TENGA PRECAUCIÓNEN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Al abrocharse el cinturón, dormir boca abajo o recibir masajes corporales, a fin de evitar que el parche CAM se despegue.

## EVITE LO SIGUIENTE:

- Evite la sudoración excesiva, ya que esto puede causar que el parche CAM se afloje.
- Evite los saunas, los baños de vapor, el yoga caliente y los ambientes extremadamente húmedos.
- Evite usar lociones o aceites corporales en el área que rodea al parche CAM.
- Evite usar objetos alrededor del cuello que puedan entrar en contacto con el parche CAM.
- Evite usar brasieres con varilla (se recomiendan los brasieres deportivos y las camisetas sin mangas durante el uso).
- Evite presionar el botón del parche CAM repetidamente o con fuerza. Si presenta algún síntoma, presione el botón suavemente una sola vez.


## CONSEJOS ÚTILES:

- Es seguro pasar por escáneres de seguridad. Informe con anticipación al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y muéstreles su diario del paciente.

- Si el parche CAM se afloja o se despegue, presiónelo y frote suavemente el adhesivo para volver a colocarlo en su lugar. Puede colocar cinta de primeros auxilios o curitas (Band-Aids) en la parte superior e inferior del parche para una mayor fijación.

## Remoción del parche CAM

- Retire el parche CAM tirando de la lengüeta que se encuentra en la parte superior y despegándolo hacia abajo.
- Si es necesario, puede utilizar la toallita removedora de adhesivo que se proporcionó en la caja de envío del parche CAM para ayudar a retirarlo.

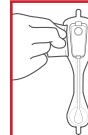

1. Limpie el borde del parche CAM con la toallita removedora de adhesivo.

## Devolución del parche CAM

- Coloque el parche CAM sobre el contorno impreso en el exterior de la bolsa blanca incluida en la caja. No desconecte el módulo registrador. Coloque el parche CAM y el diario dentro de la caja.
- Devuelva el monitor de acuerdo con las instrucciones del consultorio del proveedor.



2. Despegue lentamente el parche hacia abajo mientras aplica el removedor de adhesivo a lo largo del borde de la piel y debajo del parche CAM.

DWG000189ES-NA\_B 03/2026

## ¿Tiene alguna pregunta sobre el parche CAM?

Comuníquese con su proveedor o con el servicio de atención al cliente de BDx: +1-844-777-9283

[www.bardydex.com](http://www.bardydex.com)