

# Baxter

## Adhesive Ring

El Adhesive Ring (Anillo Adhesivo) está diseñado para ayudar a fijar el parche **CAM** a la piel del paciente durante el período de uso indicado.

### INSTRUCCIONES DE USO


Siga las instrucciones que se indican a continuación si su proveedor de atención médica le proporcionó un Adhesive Ring para que lo use con su parche **CAM**. Lea esta guía detenidamente para asegurarse de comprender todos los pasos y el orden en que se deben realizar.

**INDICACIONES DE USO:** Para su uso con el **monitor ambulatorio Carnation (CAM) de Bardy Diagnostics**.

**PRECAUCIÓN:** Puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica. Si presenta irritación cutánea o una reacción alérgica, comuníquese con su proveedor de atención médica.

### Información sobre el Adhesive Ring


La siguiente ilustración muestra las tres capas del Adhesive Ring.

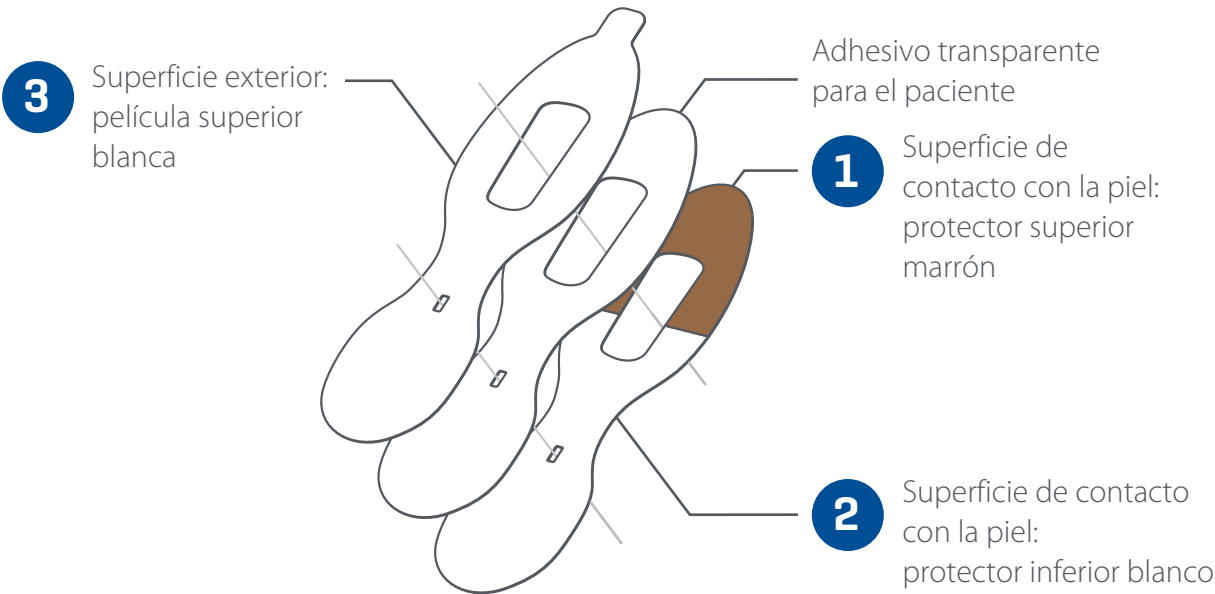

### Cómo aplicar el Adhesive Ring

**NOTA:** No lo utilice si está abierto o dañado.


- 1.** Coloque el Adhesive Ring sobre el parche **CAM** aplicado, con la película superior blanca hacia afuera.

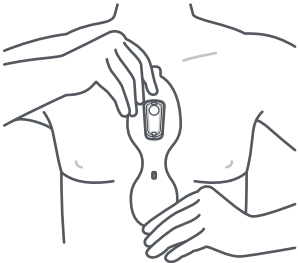

- 3.** Despegue con cuidado el protector inferior blanco [ **2** ] hacia abajo. Presione y frote el Adhesive Ring para asegurar la adhesión.



- 2.** Despegue con cuidado la lengüeta del protector superior marrón [ **1** ] hacia arriba. Presione y frote para asegurar la adhesión.

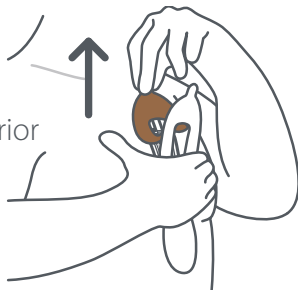


- 4.** Despegue con cuidado la lengüeta de la película superior blanca [ **3** ] hacia abajo y frote el Adhesive Ring alrededor del parche **CAM**.




**NOTA:** Una vez aplicado, el Adhesive Ring se verá translúcido.

# Cómo retirar el Adhesive Ring

1. Limpie el borde del Adhesive Ring con la toallita removedora de adhesivo.

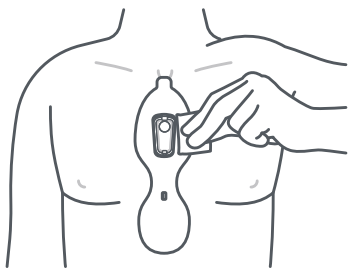
2. Despegue lentamente el parche hacia abajo mientras aplica el removedor de adhesivo a lo largo del borde de la piel, y debajo de la parte inferior del Adhesive Ring y el parche CAM.


3. Coloque el parche CAM usado junto con el Adhesive Ring sobre la parte exterior de su bolsa original.

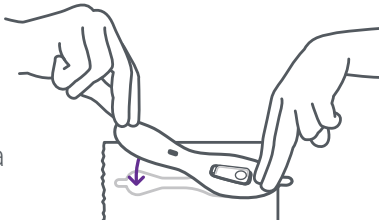
4. Limpie cualquier resto de adhesivo que quede en la piel.
5. Para devolver el parche CAM, siga las instrucciones del proveedor de atención médica.

**NOTA:** Coloque el parche CAM sobre el contorno impreso.

## Símbolos

Los productos de Bardy Diagnostics muestran uno o varios de estos símbolos.

| SÍMBOLO                                                                             | DESCRIPCIÓN                         | SÍMBOLO                                                                             | DESCRIPCIÓN          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Número de catálogo                  |  | Fabricante           |
|  | No reutilizar                       |  | Fecha de fabricación |
|  | Identificador único del dispositivo |  | Fecha de caducidad   |
|   | Solo para uso con receta médica     |  | Código de lote       |

## Asistencia

Para obtener ayuda con la aplicación o el uso del Adhesive Ring, o para informar eventos inesperados.



### COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

**Bardy Diagnostics, Inc.**  
220 120th Avenue NE, Ste 100  
Bellevue, WA 98005  
EE. UU.  
Servicio de atención al cliente de  
EE. UU.: 1-844-777-9283