


# Consejos importantes para optimizar el monitoreo con el parche CAM™



## PREPARACIÓN DE LA PIEL

Es necesario preparar la piel debidamente para poder lograr el monitoreo durante todo el plazo prescrito.

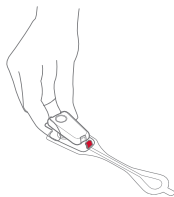

## CONEXIÓN DEL PARCHES CAM

Conecte el registrador al parche CAM sobre una superficie dura y plana (como el tablero de una mesa) y NO directamente sobre el pecho.



## ESTÉ PENDIENTE DE LA LUZ

Justo después de conectar el registrador en el parche CAM, esté pendiente de una luz verde que parpadeará durante 10 segundos.



## DIARIO DEL PACIENTE

Anote en el diario la fecha y hora de activación del parche CAM, así como cada pulsación del botón asociada a sus síntomas.